



INNOVATIVE
ECONOMY
NATIONAL COHESION STRATEGY

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND



FERTŐTLENÍTŐSZEREK



A cégekről

A Medi-Sept SP. Zoo Lengyelország vezető professzionális tisztító és fertőtlenítőszer gyártója, több mint 20 éves múltat tekint vissza. Termékeit kórházak, klinikák, magán klinikák, egyéb orvosi intézmények, közintézmények használják.



A SALUS Orthopédtechnika Kft. a gyógyászati segédeszköz gyártása és forgalmazás terén jelentős múltat visszatekintő, több mint két évtizede működő vállalkozás, ez idő alatt a cég neve összefonódott a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatás fogalmával.

Ezt egyfelől az általa gyártott minőségi, egyedi gyártású ortopédtechnikai eszközeinek, és az üzleteiben található gyógyászati, rehabilitációs termékek széles választékának köszönheti.



Másfelől az igazán minőségi szolgáltatást a cég magasan képzett és elkötelezett szakemberei nyújtják, személyes odafigyelés és gondoskodás formájában. Gyártói tevékenysége mellett jelentős kereskedelmi szereplője is a magyar gyógyászati- egészségügyi piacnak: jelentős számú viszonteladó partnerével rendszeres, napi üzleti kapcsolatot tart fenn.

Minőségbiztosítás

A Medi-Sept SP. Zoo fejlesztő, gyártó és kereskedelmi tevékenységet egyaránt folytat. Tevékenysége maradéktalanul megfelel az ISO normáknak. A gyártás területén alkalmazza az ISO EN 13485 normákat, valamint az orvosi műszerekre és a biocid eszközökre vonatkozó MDD 93/42 EC direktíváknak is megfelel. Rendszeres külső és belső auditok ellenőrzik az előírások maradéktalan betartását.


Termékek

A Medi-Line márkanév alatt futó termékvonallal magában foglalja az eszköz-, a felület- és a kézfertőtlenítő eszközöket, valamint a kézápoló termékeket. Minden fertőtlenítő készítmény szigorú tesztek megkeresztül nem csak belső vizsgálatokon, hanem független külső laboratóriumok által egyaránt. A termékek maradéktalanul megfelelnek minden vonatkozó Európai normának és előírásnak.





Felület fertőtlenítők

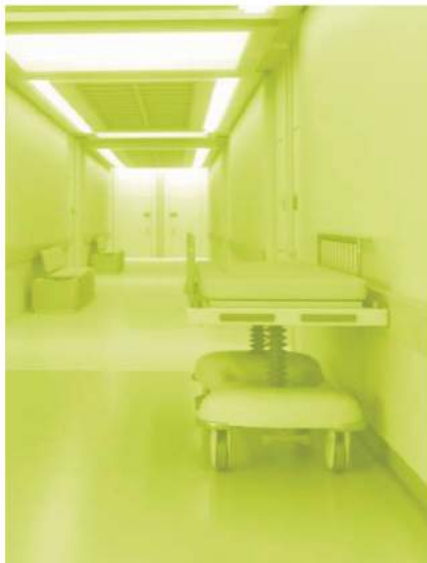

Quatroles® Extra

Koncentrátum felületek tisztítására és fertőtlenítésére

- széles mikrobaölő spektrum már 30 másodperc alatt
- rendkívüli tisztító tulajdonság
- finom, friss illat
- hatékony koncentrátum

Kifejezetten hatékony koncentrátum orvosi eszközök és nagy kiterjedésű mosható felületek, mint egységek, orvosi ágyak, padló és falak tisztítására és fertőtlenítésére.



CE 2274

Termékjellemzők:

Előnyök:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fertőtlenítőszer új szabványa szerint tesztelve (EN14855). ▪ Széles mikrobaölő spektrum: baktériumok, micobaktériumok, gombák, vírusok. ▪ Rendkívüli tisztító tulajdonságok. ▪ Magas anyagtolerancia (aldehid és fenolmentes) ▪ Finom, friss illat. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Garantált hatékonyság és biztonságos használat. ▪ Fertőzés kockázatának nagyfokú csökkentése. ▪ Gyors hatás a fertőtlenített felületeken. ▪ Számos érzékeny anyagon való alkalmazhatóság. ▪ Frissítő. ▪ Gazdaságos. |
|---|--|

Alkalmazás:

A Quatrodex® Extra egy kifejezetten hatékony koncentrátum orvosi eszközök és nagy kiterjedésű mosható felületek, mint egységek, orvosi ágyak, padló és falak tisztítására és fertőtlenítésére. Alkalmas továbbá kárpitozott anyagok, ABS, műanyag, üveg, porcelán, gumi, rozsdamentes acél, alumínium, nikkel vagy króm felületek fertőtlenítésére is. Áztatással való fertőtlenítésre is ajánlott és akril üvegből készült termékekhez is. Élelmiszerrel érintkező felületeken is alkalmazható. Nem tartalmaz aldehideket vagy fenolokat, és ez által nem vált ki allergiás reakciót, illetve nem színezi el a felületeket. Nem kell vízzel leöblíteni és kellemes virág illata van.

Hatékonyság	EN14885	15 perc	30 perc
Baktériumok (beleértve az MRSA baktériumot is)	EN 13727	0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%
Gombák	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Micobaktériumok (M. terrae, M. avium)	EN 14348	0,5%*	0,5%
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%
Burkos vírusok (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Adeno vírus	EN 14476	0,5%	0,5%
Polio vírus	EN 14476	1%	0,5%

* Tiszta körülmények

A termék biocidhatékonyságát igazoló dokumentációs bizonyíték a gyártótól elérhető.

Használati útmutató:

Készítsen oldatot a koncentrátum vízben való hígításával. A hígítás mértéke a kívánt spektrum tartománytól és a hatástartamától függ. A 0,5%-os hígítású koncentrátum elkészítéséhez adjon 5 ml koncentrátumot 995 ml vízhez. A fertőtlenített felületeket nem kell vízzel leöblíteni. Ne kombinálja más tisztító- vagy fertőtlenítőszerrel. A termék professzionális használatra készült.

Összetétel: 100g termékben:

100 g termékben: 11,50 g N-(3- amino-propil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9), 3,12 g poli (oxi-1,2- etanodil), alfa-2-(didecil-metil-amino) etil] - Omega-hidroxi-, propanoát (só) (CAS: 94667-33- 1), 1,25 g didecil-metil-ammonium klorid (CAS: 7173-51-5).

Kiszárazás: 1 literes permetező palack, kanna 5L

Övintézkedések:



OEK Mikrobiológia szakvélemény száma:
7805/590/12015

OTH engedély szám: JKF/16946-3/2015

VESZÉLY

Figyelmeztető mondat(ok):

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szervezetet. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Övintézkedésekre vonatkozó mondat(ok):

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH208 Subtilisin -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot	folyadék
Szín	világossárga, tiszta
Szag	alkoholos
Szagküszöbérték	nincs meghatározva
pH	11,6
Alsó robbanási határ	0,9% térf.
Felső robbanási határ	12,0% térf.
Oldhatóság	teljesen vízben
Öngyulladás hőmérséklet	nem öngyulladó
Robbanásveszélyes tulajdonságok	nem robbanásveszélyes
Gyulladás hőmérséklet	225 °C

Velox® Top AF

Használatra kész készítmény orvosi eszközök felületének tisztítására és fertőtlenítésére

- széles mikrobaölő spektrum már 30 másodperc alatt
- rendkívüli tisztító tulajdonság
- finom, friss illat
- használatra kész



A Velox® Top AF egy használatra kész készítmény széles spektrumú mikrobiológiai aktivitással, mely rövid és erőteljes hatóidővel párosul, hatékonyan tisztít és kiváló anyag megóvó tulajdonságokkal bír.

CE 2274

Termékjellemzők:

- Fertőtlenítőszer új szabványa szerint tesztelve (EN14855).
- Széles mikrobaölő spektrum: baktériumok, micobaktériumok, gombák, vírusok.
- Rendkívüli tisztító tulajdonságok.
- Magas anyagtolerancia (aldehid és fenolmentes)
- Finom, friss illat.
- Használatra kész

Előnyök:

- Garantált hatékonyság és biztonságos használat.
- Fertőzés kockázatának nagyfokú csökkentése.
- Gyors hatás a fertőtlenített felületeken.
- Számos érzékeny anyagon való alkalmazhatóság.
- Frissítő.
- Gazdaságos.

Velox® Top AF – Azonnal használható készítmény orvosi berendezések felületeinek tisztítására és fertőtlenítésére

Alkalmazás:

Alkohol bázisú készítmény, melyet kisebb felületek, orvosi eszközök, székek, ágyak, sebészeti eszközök, valamint élelmiszerrel érintkező felületek gyors fertőtlenítésére terveztek. Ajánlott továbbá fogászati fejek fertőtlenítésére sterilizálás előtt, protetikai kanálhoz, kanállenyomatok és szilikon lenyomatok fertőtlenítésére. Aldehyd- és fenolmentes, nem színezi el a fertőtlenített felületeket. Kellemes eukaliptusz illata van.

Hatékonyság	EN14885	Körülmények	
		tiszta	szennyezett
Baktériumok (beleértve az MRSA baktériumot is)	EN 1276	30 másodperc	1 perc
	EN 13967	30 másodperc	1 perc
	EN 13727	30 másodperc	
Gombák	EN 1650	30 másodperc	1 perc
	EN 13624	30 másodperc	
Micobaktérium (M. terrae)	EN 14348	30 másodperc	1 perc
Burkos vírusok (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola)	RKI/DVV		30 másodperc
Rota vírus	EN 14476	30 másodperc	
Adeno vírus	EN 14476	1 perc	

Biocid hatékonysággal kapcsolatos dokumentumok igény esetén elérhetők.

Használati útmutató:

Permetezze 30 cm-ről a felületre teljes fertőtleníttendő területet lefedve. A felületet nem szükséges vízzel leöblíteni, teljesen kiszárad, nem hagy foltokat. Ne alkalmazza alkoholra érzékeny felületeken (pl.: akrilüveg).

Összetétel: 100g termékben:

40 g - propan-2-ol (CAS:67-63-0),
20 g - etanol,
0,39 g - amin, n-C10-16-alkilotrimethilenodi-, klór-ecetsavval reagáló termékek,
0,25 g - didecil-dimetil-ammónium klorid.

Kiszerezés: 1 literes permetező palack, kanna 5L

Övintézkedések:



OEK Mikrobiológia szakvélemény száma: 7805/588/2015
OTH engedély szám: JKF/16943-3/2015

Figyelem

Figyelemztető mondat(ok):

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Övintézkedésekre vonatkozó mondat(ok):

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot	tiszta folyadék
Szín	színtelen
Szag	nagyon jellegzetes
pH	7,9 – 8,5, 20°C
Forráspont	<95 °C
Gyulladáspont	25 °C
Sűrűség	0,880 – 0,890 g/cm ³
Oldhatóság	oldható vízben
Öngyulladási hőmérséklet	420 °C
Robbanásveszélyes tulajdonságok	nem robbanásveszélyes



Eszközfertőtlenítők



Viruton® Forte

Koncentrátum sebészeti eszközök tisztítására és fertőtlenítésére

- 0,5%-os oldatkonzentráció
- anti-korróziós tulajdonság
- nincs szükség aktivátorra
- kitűnő tisztító tulajdonság

A Viruton® Forte egy rendkívül hatékony koncentrátum sebészeti és forgó eszközök tisztítására és egyben fertőtlenítésére is.



CE 2274

Termékjellemzők:

- Fertőtlenítőszer új szabványa szerint tesztelve (EN14855).
- Magas anyagtolerancia (aldehid és fenolmentes)
- Széles mikrobaölő spektrum: baktériumok, micobaktériumok, gombák, vírusok.
- Rendkívüli tisztító tulajdonságok.
- Alacsony 0,5%-os koncentrációjú oldat.

Előnyök:

- Számos érzékeny anyagon való alkalmazhatóság.
- Garantált hatékonyság és biztonságos használat.
- Fertőzés kockázatának nagyfokú csökkentése.
- Hatékonyan eltávolítja a száradt szerves szennyeződéseket.
- Gazdaságos.
- Sebesség és kényelem az oldatkészítésben.

Alkalmazás:

A Viruton® Forte kiválóan tisztít és széleskörű mikrobiológiai hatékonysággal bír rövid hatóidővel. Eszközök manuális fertőtlenítésére és ultrahangos tisztítók fertőtlenítésére tervezték. A termék korróziógátló tulajdonságai és nagyfokú anyag toleranciával rendelkezik. A Viruton Forte koncentrátumot rozsdamentes acél, nikkal, réz, alumínium, gumi, porcelán, üveg és műanyag eszközökhöz ajánljuk.

Hatékonyság	EN14885	15 perc	30 perc
Baktériumok (beleértve az MRSA baktériumot is)	EN 13727	0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%
	EN 13697	1%	
Gombák	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
	EN 13697	1%	
Micobaktériumok (M. terrae, M. avium)	EN 14348	4%	1%
	EN 14563	4%	1%
Burkos vírusok (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Adeno vírus	EN 14476	1%	
Polio vírus	EN 14476	4%	

Biocid hatékonysággal kapcsolatos dokumentumok igény esetén elérhetőek.

Használati útmutató:

Készítsen oldatot a koncentrátum vízben való hígításával. A hígítás mértéke a kívánt spektrumtól és a hatástartamtól függ. Az 1%-os hígítású koncentrátum elkészítéséhez adjon 10 ml koncentrátumot 990 ml vízhez. Az eszközöket használat után azonnal az oldatba kell áztatni. Minden részt és lyukat ki kell tölteni az oldattal és bele kell meríteni az oldatba. A fertőtlenítést követően öblítse le az eszközöket vízzel és szárítsa meg. A szennyeződésmentes oldat 14 napig aktív. Higiéniai okokból javasoljuk, hogy naponta cserélje az oldatot. Ne kombinálja más tisztító- vagy fertőtlenítőszerekkel. A termék professzionális használatra készült.

Összetétel: 100g termékben:

3,76 g N- (3- amino-propil) -N-dodecilpropán-1,3- diamin (CAS: 2372-82-9),
3,39 g Poli(oxi-1,2-etanodil), alfa.-[2- (didecil-metil-amino) etil]-.omega.-hidroxil-, propanoát (só) (CAS: 94667-33-1),
0,75 g 2-amino-etanol (CAS: 141-43-5).

Kíszerelés: 1 literes palack adagolóval, kanna 5L

Övintézkedések:



VESZÉLY

Figyelemztető mondat(ok):

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Övintézkedésekre vonatkozó mondat(ok):

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A helyi/területi/országos/ nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

Orvostechnika eszköznek minősül.

CE megfelelési dokumentum
száma: TNP/MDD/0131/4125/2015

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot	flyadék
Szín	termékírásnak megfelelően
Szag	nagyon jellegzetes
pH	10,8-11,2
Forráspont	100 °C
Gyulladásí hőmérséklet	> 100°C
Gőznyomás, 20°C	23 hPa
Sűrűség, 20°C	0,99-1,01 g/cm ³
Oldhatóság	teljesen vízben
Öngyulladásí hőmérséklet	nem öngyulladásí
Robbanásveszélyes tulajdonságok	nem robbanásveszélyes

Viruton® Extra

Erős koncentrátum eszközök tisztítására és fertőtlenítésére

- 0,5%-os oldatkonzentráció
- anti-korróziós tulajdonság
- nincs szükség aktivátorra
- kitűnő tisztító tulajdonság



A Viruton® Extra egy rendkívül hatékony koncentrátum mindenféle hőre labilis és termo stabil sebészeti eszközök (kivéve hajlékony endoszkópok) egyidejű tisztításához és fertőtlenítéséhez.

CE 2274

Termékjellemzők:

- Fertőtlenítésszerek új szabványa szerint tesztelve (EN14855).
- Magas anyagtolerancia (aldehid és fenolmentes)
- Széles mikrobiológiai spektrum: baktériumok, micobaktériumok, gombák, vírusok, Adeno vírus, Polio vírus.
- Rendkívüli tisztító tulajdonságok.
- Alacsony 0,5%-os koncentrációjú oldat.

Előnyök:

- Számos érzékeny anyagon való alkalmazhatóság.
- Garantált hatékonyság és biztonságos használat.
- Fertőzés kockázatának nagyfokú csökkentése.
- Hatékonyan eltávolítja a száradt szerves szennyeződések.
- Gazdaságos.
- Sebesség és kényelem az oldatkészítésben.

Viruton® Extra - Erős koncentrátum eszközök tisztítására és fertőtlenítésére

Alkalmazás:

A Viruton® Extra egy rendkívül hatékony koncentrátum mindenféle hőre labilis és termo stabil sebészeti eszköz (kivéve hajlékony endoszkópok) egyidejű tisztításához és fertőtlenítéséhez. A modern formula kitűnő tisztító hatást biztosít, még magas fehérje szennyezéssel történő rövid idejű érintkezés esetén is. A Viruton® Extra széles spektrumú még alacsony koncentrációk esetén is. Korrozio gátlók jelenléte biztosítja a széleskörű anyag kompatibilitást az eszközökkel, orvosi berendezésekkel és laboratóriumi üveggel, porcelánnal, fémekkel, gumival és műanyaggal.

Hatékonyság	EN14885	15 perc	30 perc
Baktériumok (beleértve az MRSA baktériumot is)	EN 13727	0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%
Gombák	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Micobaktériumok (M. terrae, M. avium)	EN 14348	0,5%*, 1%	0,5%
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%
Burkos vírusok (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Adeno vírus	EN 14476	0,5%*	0,5%
Polio vírus	EN 14476	1%	0,5%

*alacsony fehérje szennyezés

Biocid hatékonysággal kapcsolatos dokumentumok igény esetén elérhetőek.

Használati útmutató:

Készítsen oldatot a koncentrátum vízben való hígításával az alábbiakban leírt kívánt koncentrátumnak megfelelően. A 0,5%-os hígítású koncentrátum elkészítéséhez adjon 5 ml koncentrátumot 995 ml vízhez. Használat után azonnal áztassa be az eszközöket az oldatba. Minden részt és lyukat teljesen bele kell meríteni az oldatba. A fertőtlenített eszközöket vízzel le kell öblíteni és meg kell szárítani. A szennyeződésmentes oldat 14 napig aktív. Higiéniai okokból javasoljuk, hogy naponta cserélje az oldatot. Ne kombinálja más tisztító- vagy fertőtlenítőszerrel. A termék professzionális használatra készült.

Összetétel: 100g termékben:

11,50 g N- (3- amino-propil) -N-dodecilpropán-1,3- diamin (CAS: 2372-82-9),
3,12 g poli (oxi-1,2-etanodil), alfa.- [2- (didecil-metil-amino) etil] -. Omega.-hidroxil-, propanoát (só) (CAS: 94667-33- -1),
1,25 g didecil-metil-ammonium klorid (CAS: 7173-51-5).

Kíszerelés: 1 literes palack adagolóval, kanna 5L

Övintézkedések:



Orvostechnika eszköznek minősül.
CE megfelelőségi dokumentum száma: TNP/MDD/0131/4125/2015
VESZÉLY

Figyelemztető mondat(ok):

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H373 vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. H400 Ismétlődő Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Övintézkedésekre vonatkozó mondat(ok):

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanóvízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P314 Rosszullet esetén orvosi ellátást kell kérni.

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot	flyadék
Szín	világossárga, tiszta
Szag	alkoholos
Szagküszöbérték	nincs meghatározva
pH	11,6
Alsó robbanási határ	0,9% térf.
Felső robbanási határ	12,0% térf.
Oldhatóság	teljesen vízben
Öngyulladási hőmérséklet	nem öngyulladó
Robbanásveszélyes tulajdonságok	nem robbanásveszélyes
Gyulladási hőmérséklet	225 °C



Fogászati eszközfertőtlenítők



Viruton® Bohr

Használatra kész készítmény forgó eszközök tisztítására
és fertőtlenítésére

- magas toleranciájú anyag
- korróziógátló anyagokat tartalmaz
- széles mikrobaölő spektrum
- rövid hatásidő

A terméket precíziós forgó eszközök és más invazív orvosi eszközök tisztítására és egyben fertőtlenítésére tervezték.



CE 2274

Termékjellemzők:

- Fertőtlenítőszerek új szabványa szerint tesztelve (EN14855).
- Magas anyagtolerancia (aldehid és fenolmentes)
- Széles mikrobaölő spektrum: baktériumok, micobaktériumok , gombák, vírusok, Adeno vírus, Polio vírus.
- Rendkívüli tisztító tulajdonságok.

Előnyök:

- Számos érzékeny anyagon való alkalmazhatóság.
- Garantált hatékonyság és biztonságos használat.
- Fertőzés kockázatának nagyfokú csökkentése.
- Gyors hatás a fertőtlenített felületeken.
- Gazdaságos.

Alkalmazás:

A Viruton® Bohr terméket a fűrészek és acélból, kemény fémekből, gyémántból készült marók, csiszoló és polírozó eszközök, mint szilikon gumik, kerámia bevonatok és gyökérkezeléshez használt eszközök fertőtlenítésére ajánljuk. Korrozógátló anyagokat tartalmaz, amelyek megvédik az acél eszközöket. Kiválóan tisztít rászáradt szerves anyag maradványok esetén is. Az eszközöket áztatással vagy ultrahangos kádban is fertőtlenítheti.

Hatékonyság	EN14885	magas szervesanyag terhelés
Baktériumok	EN 13727	15 perc
	EN 14561	15 perc
Gombák	EN 13624	15 perc
	EN 14562	15 perc
Micobaktériumok (M. terrae, M. avium)	EN 14348	15 perc
	EN 14563	15 perc
Burkos vírusok (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola)	EN 14476	15 perc
Adeno vírus	EN 14476	15 perc
Polio vírus	EN 14476	15 perc

Használati útmutató:

Használat után azonnal áztassa be az eszközöket a hígítatlan termékbe. Minden részt és lyukat ki kell tölteni a folyadékkal és bele kell meríteni a folyadékba. Egy bizonyos idő után, vegye ki az összes eszközt, öblítse le vízzel és szárítsa meg. Látható szennyeződés esetén tisztítsa meg az eszközöket egy kefével és áztassa be ismét a termékbe. Az eszközöket tisztítást, fertőtlenítést, és szárítást követően sterilizálja. Ne kombinálja más tisztító- vagy fertőtlenítőszerrel. A termék professzionális használatra készült.

Összetétel: 100g termékben:

0,15 g N- (3- amino-propil) -N-dodecilpropán-1,3-diamin
0,14 g Poli (oxi-1,2-etanodil), alfa-[2-(didecil-metil-amino) etil]-omega.-hidroxi-, propanoát (só)

Kiszerezés: 1 literes palack mosó, kanna 5L

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot	folyadék
Szín	termékleírás szerint
Szag	nagyon jellegzetes
pH	9,8-10,2
Forráspont	100 °C
Lobbanáspont	>100 °C
Gőznyomás, 20 °C	23 hPa
Oldhatóság	teljesen vízben
Sűrűség, 20 °C	0,99-1,01 g/cm ³
Öngyulladás hőmérséklet	nem öngyulladó
Robbanásveszélyes tulajdonságok	nem robbanásveszélyes

Orvostechnika eszköznek minősül.

CE megfelelési dokumentum száma:
TNP/MDD/0131/4125/2015



Kézfertőtlenítők és kézapolók



Velodes® Soft

Higiéniai és sebészeti kézfertőtlenítő folyadék

- széles mikrobaölő spektrum
- finom, friss illat
- hatás már 30 másodperc alatt



Használatra kész, alkohol bázisú termék, melyet higiéniai és sebészeti kézfertőtlenítésre terveztek. Széleskörűen bizonyított fertőtlenítő tulajdonságokkal bír a baktériumokkal, micobaktériumokkal, gombákkal és egyes vírusokkal szemben. Deaktiválja az olyan betokosodott vírusokat, mint HIV, HBV, HCV.



Termékjellemzők:

- Fertőtlenítőszer új szabványa szerint tesztelve (EN14855).
- Széles mikrobaölő spektrum: baktériumok, micobaktériumok, gombák, vírusok.
- Finom, friss illat.
- Használatra kész.

Előnyök:

- Garantált hatékonyság és biztonságos használat.
- Friss érzés, kellemes, finom illat.
- Egyidejű kézvédelem és kézápolás a lanolin tartalomnak köszönhetően.
- Élvezet használni
- Gyors és kényelmes használhatóság

Alkalmazás:

A Velodes Soft egy használatra kész, alkohol bázisú termék, melyet higiéniai és sebészeti kézfertőtlenítésre terveztek. Hatás már 30 másodperc alatt. Glicerint tartalmaz, amely védi a bőrt az alkoholtól, semleges pH, jó bőrtolerancia.

Hatékonyság	EN14885	Adagolás és hatásidő
Baktériumok	EN 1500 (higiénés fertőtlenítés)	2x3 ml 90 másodperc alatt
	EN 12791 (sebészeti fertőtlenítés)	2x3 ml 90 másodperc alatt
	EN 13727	30 másodperc
Gombák (<i>C. albicans</i>)	EN 1275	30 másodperc
	EN 13624	30 másodperc
Micobaktérium (<i>M. avium</i>)	EN 14348	30 másodperc
Burkos vírusok (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola)	EN 14476	30 másodperc

Biocid hatékonysággal kapcsolatos dokumentumok igény esetén elérhetők.

Használati útmutató:

Higiéniai kézfertőtlenítés (EN 1500 szerint): 2 x 3 ml terméket dörzsöljön a kezébe 30 másodpercen keresztül. Sebészeti kézfertőtlenítés (EN 12791 szerint): 2 x 3 ml terméket dörzsöljön tiszta és száraz kézbe 90 másodpercen keresztül. A termék 3 órán tartó sebészeti fertőtlenítő hatással bír. Használat előtt olvassa el a műszaki adatlapot. A termék professzionális használatra készült.

Összetétel: 100g termékben:

60 g - propan-2-ol,
0,5 g - klórhexidin-glükonát.

Kiszerezés: 250 ml-es flakon porlasztóval, 0,5 literes palack, 1 literes palackmosó, kanna 5 liter

Övintézkedések:**Figyelem**

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Övintézkedésekre vonatkozó mondat(ok):

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLES esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A helyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.

OEK Mikrobiológia szakvélemény száma:
7805/589/12015

OTH engedély szám:
JKF/16947-3/2015

Figyelem**Fizikai és kémiai tulajdonságok:**

Halmazállapot	tiszta folyadék
Szín	színtelen
Szag	illatosított
pH	7,3-7,8, 20°C
Olvadáspont	nincs adat
Forráspont	<95 °C
Sűrűség	0,880 – 0,890 g/cm ³
Oldhatóság	oldható vízben
Robbanásveszélyes tulajdonságok	nem robbanásveszélyes

Velodes® Scrub

Antibakteriális emulzióhigiénikus kézmosásra



A Velodes® Scrub kézmosásra és mosakodásra alkalmas emulzió.

Színezék- és illatanyag-mentes.

Kiváló orvosok, sztomatológus szakorvosok, nővérek és érzékeny bőrű személyek részére, akik gyakran mosnak kezet

A Velodes® Scrub kézmosásra és test mosására alkalmas emulzió. Antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik. Nem tartalmaz szappant, így allergiás és szappan alapú termékekre érzékeny személyek is használhatják.

Leírás:

A Velodes® Scrub egy finom emulzió kézmosásra és mosakodásra. A termék színezék- és illatanyagmentes. Tökéletes orvosok, fogorvosok, nővérek és érzékeny bőrű személyek részére, akik gyakran mosnak kezet. Természetes pH-val rendelkezik, a glicerin tartalma és a kókusz olaj kivonat lehetővé teszi az irritáció nélküli mindennapos használatot. Triklozán tartalmának köszönhetően olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek gátolják a baktériumok kialakulását.

Használata:

Tegyen egy kevés emulziót nedves kézre, oszlassa el és dörzsölje be, amíg fel nem habosodik, majd öblítse le vízzel.

Összetevők:

Víz, Nátrium Laureth-szulfát, Laudamido-propilbetain, Kokamid DEA, nátrium-klorid, glicerin, citromsav, tartósítószer, triklozán.

Lejárat dátuma / Soroatszám: Lásd a csomagoláson

pH 5,5-6,5

Velodes® Soap

Emulzió kézmosásra és mosakodásra az egész testen



A Velodes® Szappan kézmosásra és mosakodásra alkalmas emulzió. Glicerint és kókusz olaj kivonatot tartalmaz a bőr védelmére a túlzott kiszáradás megakadályozására és a gyengéd hidratálásért. A termék bőrbarát pH-val és gyengéd tisztító összetevőkkel rendelkezik.

Alkalmazás:

A Velodes® Szappan kézmosásra, fej és test mosására alkalmas emulzió. Nem tartalmaz szappant, így allergiás és szappan alapú termékekre érzékeny páciensek is használhatják. Ezt az emulziót kifejezetten ajánljuk egészségügyi dolgozók számára, akik bőre érzékeny a gyakori kézmosás miatt, mivel a termék bőrtápláló összetevőket tartalmaz. Felfekvő betegeknek is javasolt a termék.

Használata:

Kézmosás: tegyen egy kevés emulziót nedves kézre, oszlassa el és dörzsölje be, amíg fel nem habosodik. Majd öblítse le vízzel. Zuhanyzáshoz: tegye nedves bőrre és hajra, oszlassa el és dörzsölje be. Mosakodjon meg és öblítse le folyóvízzel. Kádban való fürdéshez: öntsön egy kevés emulziót a vízzel teli kádba. Mosakodjon meg és mossa meg a haját, majd öblítse le folyóvízzel.

Összetevők:

Víz, Nátrium Laureth, szulfát, glikol-disztearát és Laureth-4 Kokamido-propil betain, Kokamid DEA, Kokamido-propil betain, nátrium-klorid Kokamin-oxid, Glicerát-2-kokoát, citromsav, Parfüm, tartósítószer, CI 74180.

pH 5,5-6,5

Velodes® Cream

Kézvédő krém



A Velodes® Krém egy gyengéd krém a kezek és a test ápolására. Ápolja és regenerálja a bőrt, segíti a bőr megújulást és enyhíti az irritációt.

A Velodes® Krém egy gyengéd krém a kezek és a test ápolására. Ápolja és regenerálja a bőrt, segíti a bőr megújulását és enyhíti az irritációt.

Alkalmazás:

A Velodes® Krém hidratálja, nagymértékben nyugtatja a bőrt és csökkenti az érdes bőr érzetét. Mindennapos használatra ajánljuk a gyakori kézmosást követően és higiéniai fertőtlenítés céljából. Különösen ajánlott orvosok, egészségügyi személyzet és olyan személyek számára, akik érzékenyek a gyakori kézmosás és kesztyű viselés okozta bőr szárazságra és áztatására. Bársonyos puhaságú bőrt biztosít, továbbá védi azt és enyhíti a bőr irritációt. Gyorsan beszívódik ez által azonnali komfort érzetet nyújt.

Használat:

Tegyen egy kevés krémet a kezén lévő száraz bőrfelületre. Finoman masszírozza be a bőrbe és a körmeire. Minden kézmosás után ismételje meg.

Összetevők:

Víz, cetosztearil-alkohol, gliceril-sztearát, izopropil -palmitát, cetearat-20, Ciklopentasziloxán, Paraffinum Liquidum, Fenoxietanol (és) Etilhexil glicerín, DMDM Hidantoin, Karbomer, Parfüm, citromsav, BHT, Olea Europaea (Oliva) olaj, tokoferol-acetát, Trietanol-Amin, Linalool, Citronellaolaj, Alfa-Izometil Ionon, geraniol, limonén, Hexil Cinnamal

BŐRGYÓGYÁSZATILAG TESZTELVE