

SZTÓMATERÁPIA

ESZKÖZÖK, KELLÉKEK

A sztóma megfelelő ellátásához rendkívül fontos a megfelelő eszközök kiválasztása. Ennek első követelménye, hogy a bélsártartó zsák a bőr számára legyen kíméletes, az agresszív váladékokkal szemben viszont tartós és ellenálló. Legyen jó szagzáró, anyaga pedig tartós, könnyen kezelhető. Ne sercegjen vagy zörögjön, hogy észrevétlenül lehessen viselni a ruházat alatt.

Az eszköz lehet egy vagy kétrészes. Az egyrészes rendszerben a bélsártartó bőrbarát, öntapadós felülettel van ellátva.

A kétrészes rendszer alkalmazásakor a sztóma köré hidrokolloid alaplapot helyezünk fel, mely 3-6 napig maradhat fenn a bőrön és erre az alaplapra patentszerűen lehet a megfelelő zsákot helyezni, szükség szerint cserélni.

Mindkét rendszerben megkülönböztetünk zárt, szénzűrővel ellátott kolosztómás zsákot; nyitott, csattal zárható ileosztómás zsákot; illetve nyitott, csappal zárható, visszafolyásgátlóval kiegészített urosztómás zsákot.

A termékek OEP támogatottak.

Sztómaviselőknek segítséget nyújtó termékeink:

COLOPLAST

Sztómazacskók

Zörgésmentes anyagból készülnek, hasfallal érintkező oldalukat puha, nedvszívó nemszőtt fátyol borítja. Típusai zárt és nyitott zacskó, anyaguk lehet átlátszó és bőrszínű.

Minden zárt zacskó beépített szénzűrővel készül. A zacskóhoz mellékelt öntapadó papírkoronggal a szűrő ideiglenesen elzárható pl. fürdésnél, úszásnál.

Alterna egyrészes eszközök

Az egyrészes zárt eszközök három különböző méretben (mini, midi és maxi) állnak rendelkezésre. Anyaguk lehet átlátszó és bőrszínű.

Az egyrészes zárt zacskókon kialakított biztonságos tapadást biztosító, valamint nedvszívást és gyengéd eltávolítást egyszerre lehetővé tevő kettős spirál tapadó felület a sűrű zacskócsere esetén is megvédi a bőrt az irritációtól. A zárt zacskókon található beépített **Alterna** szénzűrőt egy patkó alakú háló fedi, amely lehetővé teszi a levegő és nedvesség átáramlását, de a széketnek útját állja. A háló és a szűrő között elhelyezkedő félig áteresztő membrán már a nedvességet sem engedi át, csak a levegőt. Ezáltal az **Alterna** szűrő nem záródik el és folyamatosan biztosítja a sztómaviselő diszkrétcióját.

A nyitott zacskók tapadófelületének az agresszív híg béltartalom naponta többszöri ürülése esetén is biztosítani kell a tökéletes bőrvédelmet. Ezért az **Alterna** nyitott zacskók tapadófelülete is ehhez igazodva biztonságos viseletet és gyengéd eszközcserét tesz lehetővé. A nyitott zacskókat a dobozban mellékelt öntapadó záró klipsszel zárhatja le. A hasfal felé kezdve, a zacskó alsó részének feltekerésével, majd a kétoldalt kiálló fülek behajlításával biztonságosan és higiénikusan zárhatja be a zacskót. A záró klipsz a test ívére hajlítható, így az eszköz viselete kényelmes és diszkrét.



Alterna kétrészes eszközök

A kétrészes zacskók két különböző méretben (midi és maxi) állnak rendelkezésre. Az alaplapok 40, 50 és 60 mm átmérőjű karimával készülnek.

A kétrészes zacskókon található **Alterna** záró gyűrű tökéletes biztonságot nyújt és akár egy kézzel is kezelhető. Nagy előnye, hogy a felhelyezés során nem kell nyomóerőt kifejteni, így használata teljesen fájdalommentes. A helyes zárást jól hallható kattánós hang jelzi. A záró gyűrű akár egy ujjal is nyitható és a kívánt pozícióba forgatható.

A zárt zacskókon található beépített **Alterna** szén-szűrőt egy patkó alakú háló fedi, amely lehetővé teszi a levegő és nedvesség átáramlását, de a székletnek útját állja. A háló és a szűrő között elhelyezkedő félig áteresztő membrán már a nedvességet sem engedi át, csak a levegőt. Ezáltal az **Alterna** szűrő nem záródik el és folyamatosan biztosítja a sztómviseelő diszkrétcióját.

A nyitott zacskókat a dobozban mellékelt öntapadó záróklipsszel zárhatja le. A hasfal felé kezdve, a zacskó alsó részének feltekerésével, majd a kétoldalt kiálló fülek behajlításával biztonságosan és higiénikusan zárhatja be a zacskót. A záróklipsz a test ívére hajlítható, így az eszköz viselete kényelmes és diszkrét. A nyitott zacskókat külön beszerezhető csattal is lezárhatja.



Alterna urosztómás zacskók

Az urosztómával élők számára kifejlesztett egy- és kétrészes **Alterna** urosztómás zacskók egyszerre biztosítják a szivárgás- és szagmentes eszközhasználatot. Az egy- és kétrészes **Alterna** urosztómás eszközök tapadófelülete tökéletes védelmet nyújt, a napközben folyamatosan ürülő maró hatású vizelet ellen. Midi (150 ml) és maxi (375 ml) méretben készülnek.

Az **Alterna** urosztómás zacskók visszafolyásgátlója megakadályozza, hogy a vizelet visszafolyhasson a sztómához. Ezáltal az állott vizelet nem áztatja fel a tapadófelületet és nem marja fel a sztóma körüli érzékeny bőrt.

Az **Alterna** urosztómás zacskók egyszerűen és biztonságosan kezelhető leeresztő csővel rendelkeznek. A csőhöz rögzített záródugó minden ürítés alkalmával kéznél van, mivel az a zacskó elválaszthatatlan része. A kialakításnak köszönhetően a zacskó minden alkalommal teljesen kiüríthető.

A kétrészes zacskókon található **Alterna** záró gyűrű tökéletes biztonságot nyújt és akár egy kézzel is kezelhető. Nagy előnye, hogy a felhelyezés során nem kell nyomóerőt kifejteni, így használata teljesen fájdalommentes. A helves zárástól hallható kattánós hang jelzi. A záró gyűrű akár egy ujjal is nyitható.



Alterna konvex eszközök

Az **Alterna** konvex alaplapok a redőben elhelyezkedő és a behúzódó sztómák egyedülálló ellátására készültek. A konvex alaplapok ragasztófelülete a kívánt méretre vágható.

A behúzódó sztóma ellátása sok gondot szokott okozni. Ha a tapadófelület nem követi mindenhol a test alakját, akkor az agresszív béltartalom könnyen felmarhatja a sztóma körüli bőrfelületeket. Megoldást jelenthet, ha a sztóma körül enyhe nyomást gyakorolunk a hasfalra, hogy az a sztóma kifelé mozdulását eredményezze és így az eszköz tapadófelületéhez hozzásimuljon. Ily módon elkerülhető az alámaródás és a bőrirritáció. Az Alterna konvex alaplapok ezt az enyhe nyomást gyakorolván a hasfalra, folyamatosan biztosítják a bőrfelület és a tapadófelület hézagmentes kapcsolatát.



Minicap sztómasapka

A sztómasapka kicsi, kerek, segédeszköz, sztóma zacskó helyett viselhető. Bőrszínű, kívülről vízhatlan anyagból készül, zuhanyozni is lehet vele. A bélgázok szagtalanítására a beépített szén-szűrő szolgál. Belül, a sztóma védelmére és a bélnedv felfogására nedvszívó anyagból készült puha betét található.

A sztómasapkát irrigáló kolosztómások viselhetik.



Coloplast Paszta

Ideális a műtéti hegek, egyenetlenségek, ráncok kiegyenlítésére a sztóma körül. Használatával a segédeszköz sima felületre ragasztható. Védi a sztóma környékét a széklet melléfolyásától és megnöveli az eszköz viselésének időtartamát.

Coloplast Csíkpaszta

A **Coloplast** csíkpasztája rugalmas, gyurmaszerű, képlékeny tapadóanyag, mely nem tartalmaz alkoholt, nem csíp és megkíméli a bőrt. A pasztát könnyű benyomni a mélyebb bőrredőkbe vagy egyéb irritációnak kitett bőrfelületekre. A paszta kitölti a bőrredőket és üregeket, és alkalmas a bőrön külső védőréteg kialakítására is.

Nova zsákok

A NOVA zsákokról általában

Szűrő: A Nova kettős szűrője 100%-ban orvosi szénből készült, és 71 liter gáz megkötésére képes. A külső fóliaborítás megakadályozza, hogy a szűrőn keresztül váladék ürüljön, és védi a szűrőt a külső nedvességtől. Többretegű film védi a szűrőt.

Külső borítás: Puha, nem szőtt, vízlepergető borítás.

Zsák anyaga: A dombornyomású belső felületnek köszönhetően apró légtasakok keletkeznek, amik csökkentik a zsák statikus feltöltődését és a fólia összetapadását, valamint a zajt.



A NOVALIFE zsákokról általában

Szűrő: megnövelt teljesítményű, 100%-os orvosi szénből készült, kettős kamra kialakítással. A szűrő külső és belső oldalát is GORE-TEX orvosi membrán borítja, ami megakadályozza a szűrő eltömődését, mivel csak a gázok juthatnak át rajta. Hatékonyan megköti a kellemetlen szagokat. Gyorsan átengedi a gázokat, ezzel csökkenti a ballonosodás lehetőségét.

Külső borítás: nem szőtt, puha, vízlepergető réteggel impregnált anyag.



Urosztóma zsákokról általában

Külső borítás: nem szőtt, puha, vízlepergető anyag. A zsák többrétegű filmmel van ellátva.

Egyéb: Az urosztóma zsákok torlószeleppel vannak ellátva, ami megakadályozza a vizelet visszafolyását, és így minimálisra csökkenti a fertőzés kockázatát. A kimeneti szelep biztonságos és könnyen kezelhető.




Alaplapok

A NovaLife 2 alaplap

Ovális alakú tapadófelület, a felső szélre helyezett kezdőnyílással.



Nova 2 alaplap

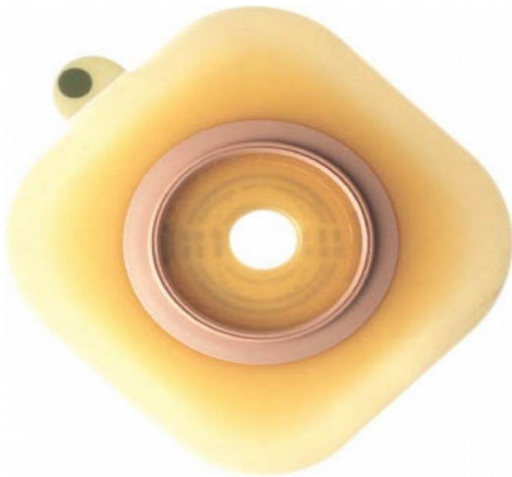

Az alaplapon a kezdőnyílás méretre vágható, így pontosan a sztómához igazítható (15 mm-től 62 mm-ig). Az alaplap 4 gyűrűmérettel készül. A tapadó felület a sztóma körül vastagabb, majd a szélek felé fokozatosan elvékonyodik (0,55-1,65 mm). A gyűrűk összeillesztésekor a zárószerkezet jellegzetes kattató hangot ad.

A Nova X3 alaplap

Az alaplap két gyűrűméretben elérhető, vastagsága 3 mm. Az alaplap a szélek felé elvékonyodik, a sztómánál 3mm, a széléknél 1 mm. Nem allergén, bőrbarát 5,2 PH értékű.



