

## KATÉTEREZÉS, KATÉTEREK

### Leccapoló katéterek

Leccapoló katétert napi 4-5 alkalommal a folyadékbeviteltől függően lehet alkalmazni.

#### **Medicoplast műanyag, egyszerhasználatos, steril leccapoló katéter**

**Női:** 18 cm hosszú, 5-34 Ch közötti méret. A leggyakrabban használatos méretek 10-14 Ch közöttiek. A méreteket színkóddal jelölik.




OEP támogatott termék

**Férfi:** 40 cm hosszú 5-28 Ch közötti méret. A leggyakrabban használatos méretek 10-14 Ch közöttiek. A méreteket színkóddal jelölik.



OEP támogatott termék

**Tiemann férfi leccapoló katéter:** 48 cm hosszú, kissé megtört, kihegyezett vég oldalnyílással.

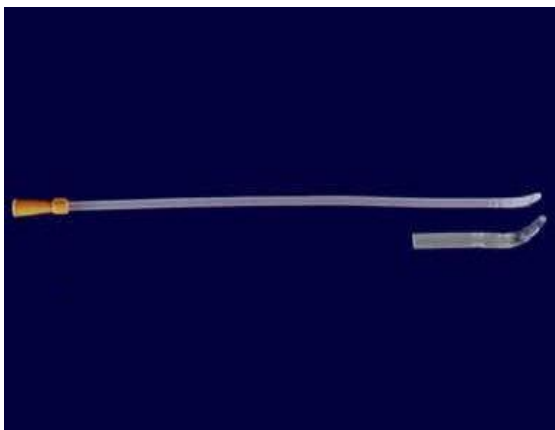

OEP támogatott termék

### Ballon katéterek

Anyaguk, latex, szilikonozott latex vagy 100 % szilikon.

#### Nelaton Rüsç Latex Ballon Katéter 12-24 Ch



OEP támogatott termék

#### Tiemann Rüsç Szilikonozott Férfi ballon katéter 12-24 Ch



OEP támogatott termék

#### Nelaton Rüsç Brillant 100 % szilikon ballon katéter 12-24 Ch



Megerősített ballon, szilikon alapanyag

OEP támogatott termék

#### Dover Foley/Sherwood 100 % Szilikon Ballon Katéter 12-24 Ch

A Dover 100% szilikon Foley katéter egy tisztán szilikon Foley katéter dupla lumen szárral, proximális tölcsérrel, felfújó szeleppel és a disztális hegyén retenciós balonnal. Kizárólag vizeletdrenázs céljára. Rutinlecsapolásra javallott.



OEP támogatott termék

#### **Dover Foley/Kendall 100 % Szilikon Ballon Katéter 12-24 Ch**



OEP támogatott termék

#### **Dover Foley 100 % Szilikon Ballon Katéter 12-24 Ch**

A Dover 100% szilikon Foley katéter egy tisztán szilikon Foley katéter dupla lumen szárral, proximális tölcsérrel, felfújó szeleppel és a disztális hegyén retenciós balonnal. Kizárólag vizeletdrenázs céljára. Rutinlecsapolásra javallott. Ellenjavallat: ismert vagy gyanított uretralis trauma.



OEP támogatott termék

#### **Nelaton Norta 100 % Szilikon Ballon Katéter**

Optimális nagy kapacitású vizelet elvezetésére. Zárt rendszerének köszönhetően a fertőzés kockázata nagyon alacsony. A Nortá katétereket a szervezet jól tolerálja, ami a termék szilikon bevonatának köszönhető.



OEP támogatott termék

#### **LoFric Gyermekek Katéter 20-30 cm hosszú Ch06-Ch10**

Bevezető katéter gyerekek számára. A LoFric katétert könnyű felhelyezni és eltávolítani és ezért igen kíméletes a húgycsőhöz. Ez a katéter felületének köszönhető, amely nedves állapotban többségében vizet tartalmaz. A LoFric katétert használata során szinte csak a vízréteg kerül érintkezésbe a húgycső érzékeny nyálkahártyájával. A LoFric használatával elkerülhető a kellemetlen frikció és a külön síkosító anyag használata. A használatot megelőzően csak 30 mp-re vízbe kell helyezni a LoFric katétert. A katéter felszínén egy vízréteg alakul ki, amely a katéterezés során megmarad. Így a LoFric katéter könnyedén csúszik befelé és kifelé is.



OEP támogatott termék

#### **LoFric Hidro-Kit Nelaton Katéter Szett Női és Férfi Ch08-Ch14 méretek**



OEP támogatott termék

A LoFric Hydro-Kit egy három az egyben katéter-rendszer, amely egy katétert, egy vizet tartalmazó tasakot és egy vizeletgyűjtő zsákot tartalmaz. Főleg a kerekesszékes felhasználók találják kényelmesnek. A gyűjtőzsák ideálissá teszi a használatot az ágyhoz kötött betegek számára. A LoFric Hydro-Kit szabadságot és megnyugvást jelent a felhasználó számára, hiszen mindegy, hogy hol tartózkodik, mikor van szüksége katéterezésre, vagy, hogy van-e a közelben mosdó használati lehetőség. Férfi, női és gyermek méretben kapható.

Vízpárna steril vízzel. Össze kell hajtani és megnyomni az aktiváláshoz.

- 1000 ml-es gyűjtőzsák beosztásokkal. Latexmentes.
- Függesztő-nyílás a zsák felakasztásához.
- Kiürítési lehetőség. A zsákot el kell tépni a kiürítéshez.
- A katétert ki lehet venni a gyűjtőzsákból.
- Az Urotonic™ Felületi Technológia biztosítja a síkos felületet és a maximális komfortot.
- Egy külön rész gondoskodik arról, hogy keze ne érintkezzen közvetlenül a katéterrel.
- Lekerekített katéternyílások.

#### **LoFric Nelaton Hidrofil Felületű Bevezető Katéter Férfiak Számára 40 cm Ch10-Ch20 méretek**



OEP támogatott termék

Bevezető katéter férfiak számára. A LoFric katétert könnyű felhelyezni és eltávolítani és ezért igen kíméletes a húgycsőhöz. Ez a katéter felületének köszönhető, amely nedves állapotban többségében vizet tartalmaz. A LoFric katéter használata során szinte csak a vízréteg kerül érintkezésbe a húgycső

érzékeny nyálkahártyájával. A LoFric használatával elkerülhető a kellemetlen súrlódás és a külön síkosító anyag használata. A használatot megelőzően csak 30 mp-re vízbe kell helyezni a LoFric katétert. A katéter felszínén egy vízréteg alakul ki, amely a katéterezés során megmarad. Így a LoFric könnyedén csúszik befelé és kifelé is.

#### **LoFric Hidrofil Felületű Leccapoló Katéter Nők Számára Ch08-Ch18 méretek**



OEP támogatott termék

Bevezető katéter nők számára. A LoFric katétert könnyű felhelyezni és eltávolítani és ezért igen kíméletes a húgycsőhöz. Ez a katéter felületének köszönhető, amely nedves állapotban többségében vizet tartalmaz. A LoFric katétert használata során szinte csak a vízréteg kerül érintkezésbe a húgycső érzékeny nyálkahártyájával. A LoFric használatával elkerülhető a kellemetlen súrlódás és a külön síkosító anyag használata. A használatot megelőzően csak 30 mp-re vízbe kell helyezni a LoFric katétert. A katéter felszínén egy vízréteg alakul ki, amely a katéterezés során megmarad. Így a LoFric könnyedén csúszik befelé és kifelé is.

#### **Oasis Hi-Slip Plus Hidrofil Felületű egyszerhasználatos katéter Steril Vízpárnával**



OEP támogatott termék

A HI-SLIP Plus egy húgyuti katéter, amelynek felületi bevonata PVP (polivinilpirrolidon) nevű anyag, mely vízzel érintkezve nagyon csúszóssá válik. Ezáltal a katéterezés könnyebbé, súrlódásmentessé tehető.

Használat: Vegyen ki 1 db katétert a dobozból. Ne bontsa fel a csomagolást! Fakassza szét a vízpárnát (összehajtással, nyomással). Bizonyosodjon meg róla, hogy a katéter 30 másodpercig a vízben ázott és kész a katéterezésre. Ekkor bontsa fel a csomagolást és a víz kiöntése után végezze el a katéterezést.

Gyermek, férfi és női kivitelben.

#### **Sauer-Csuti IQ Catch Hidrofil Felületű Férfi Katéter Ch12-Ch16**



OEP támogatott termék

Hydrofil bevonatú 43 cm hosszú katéter férfiak számára. Az IQ-Catch szerkezete, 1: Gömbfej melynek kialakítása megakadályozza, hogy a katéter-fej a húgycsőben megakadjon és így sérülést okozzon. 2: Puha zóna. A gömbfej és a hajlékony előrész kombinációja lehetővé teszi, hogy az IQ-Catch erős nyomás nélkül is felcsússzon a húgycsőbe. 3: Lekerekített katéterszem. Kívül és belül egyaránt lekerekített, így kizárt az érzékeny húgycső-nyálkahártya bármilyen sérülése.

#### VIZELETGYŰJTŐ ZSÁK

A katéteren távozó vizelet gyűjtésére használt eszköz. Steril, egyszer használatos.




Urin 1,5 liter

OEP támogatott termék



Urin 4 2 liter

OEP támogatott termék

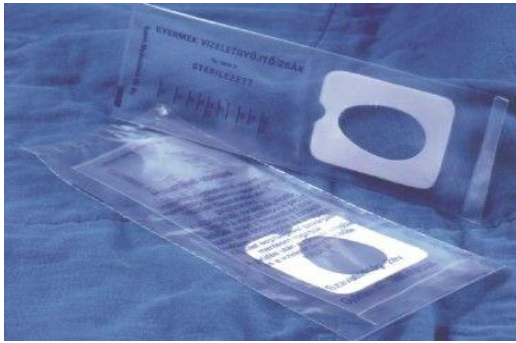

\_Urin 11 Gyermekek 0,2 liter OEP támogatott termék

### Urine Bag Vizeletgyűjtő 2 Liter

Alsó kifolyású vizeletgyűjtő, keresztcsapos (T csapos) leürítéssel. Urológiai katéterrel ellátott betegek vizeletének vagy testnedvek összegyűjtésére. Térfogat: 2000 ml. Felfüggeszthető kivitel, rugalmas lágy PVC zsáktest, 100 ml-kénti skálabeosztás, PVC kiöntőcső keresztcsappal a zsák könnyű és higiénikus leürítésére.

